

Kevennyksen tekeminen PIRKA hoitokenkään



Vaihe 1, Poista pohjallinen kengästä



Vaihe 2. Merkitse alue (esim. huulipunalla)



Vaihe 3. Merkitse/siirrä merkki pohjalliseen.



Vaihe 4. Valmista kuoppa.



Vaihe 5. Täytä kevyesti pumpulilla.



Vaihe 6. Peitä esim. kangaslaastarilla.



Vaihe 7. Laita pohjallinen kenkään.



Vaihe 8. Tarkista kaiken olevan ok.



Vaihe 9. PIRKA hoitokenkä valmiina käyttöön.